



Dispositivi medici

Siringhe ipodermiche monouso/sterili



Involucro singolo/sterile

Confezione 100 pezzi

**Siringhe ad infusione ed irrigazione monouso
cono Luer Slip a tre pezzi con ago/copriago**

Formato 1 ml / 25G x 5/8"

Siringhe ipodermiche monouso/sterili

CARATTERISTICHE

Siringhe sterili con cono Luer Slip, leggere, affidabili e precise, in formato da 1 ml, sterilizzate con ossido di etilene, 100% latex free. Ago e copriago sono inclusi nella confezione.

Confezionamento: Box 100 pezzi / involucro singolo/sterile

DETTAGLI TECNICI

COMPOSIZIONE:

Componente		Materiale
Siringa	Cilindro	PP
	Stantuffo	PP
	Pistone	Gomma
Ago	Ago	Acciaio antiruggine 304 (doppia affilatura)
	Copriago	PP

Tipo: sterile / dotata di ago/cono Luer Slip

Standard: Dispositivo medico di classe IIb

CND A02010202 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK

Progressivo di registrazione dispositivo medico: 2086653

Condizioni di conservazione: Conservare nel loro imballaggio originale in luogo fresco e ventilato, in condizioni di umidità relativa inferiore a 80%. Non utilizzare in presenza di gas corrosivi, disinfettanti a base di fluoro o paracetaldeide.

Shelf life: 5 anni dalla produzione

Durata sterilità: 3 anni dalla produzione

FUNZIONI

Dispositivi sterili, usati per infusione o irrigazione venosa, muscolare, sottocutanea. Possiedono un meccanismo di protezione dell'ago, il quale riduce al minimo la possibilità che l'utilizzatore si punga accidentalmente durante una procedura con tale dispositivo. L'ago è in acciaio, retto e di lunghezza e diametro variabili.

Monouso, non riutilizzare o risterilizzare.

CE 0197



E' un dispositivo medico di classe IIb.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione del 29/03/2021


Siringhe ipodermiche monouso/sterili

ISTRUZIONI PER L'USO

- Rimuovere l'involucro ed estrarre la siringa.
- Aggiustare l'ago fino ad un'adesione ottimale. Rimuovere il copriago.
- Espellere l'aria all'interno della siringa.
- Estrarre il liquido.
- Iniettare.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Misure ago 1 ml: 25G x 5/8" (Ø est. ~ 0,5 mm / lunghezza 16 mm)

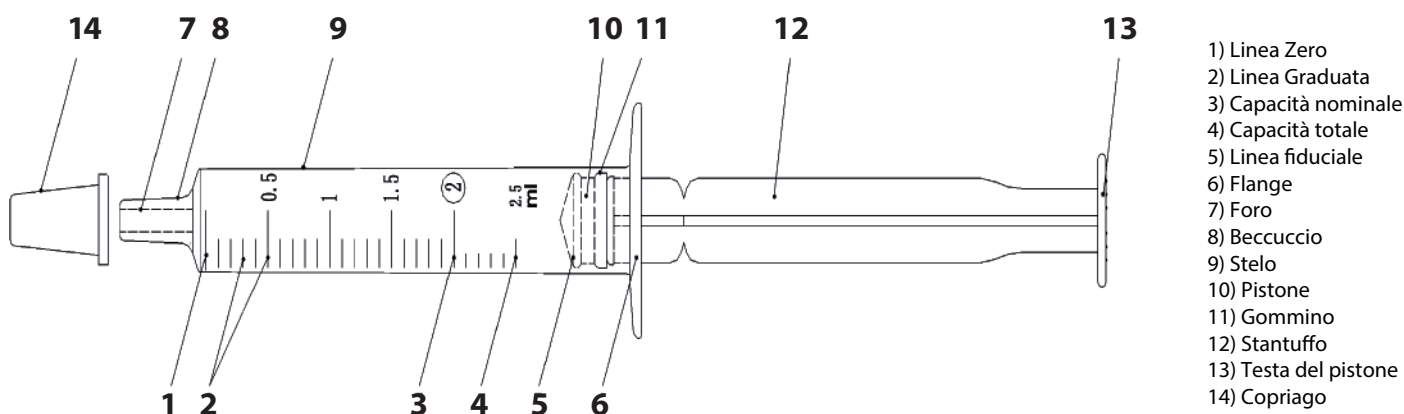

AVVERTENZE

- Controllare l'integrità dell'involucro prima dell'uso. Non utilizzare se la confezione è rotta, sporca, danneggiata o altrimenti compromessa. Non utilizzare dopo la data di scadenza (riportata sulla confezione).
- Prodotto destinato all'uso di personale medico qualificato.
- Durata sterilità: 3 anni dalla produzione
- Il prodotto è monouso; non riutilizzare o risterilizzare.
- Non adatto all'utilizzo con paracetamide;
- Non adatto a iniezioni di insulina o altre sostanze non compatibili con dispositivi realizzati in PP (Polipropilene).

CE 0197



E' un dispositivo medico di classe IIb.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione del 29/03/2021

Barcode 100 pz.

