



Dispositivi medici

My Benefit Mask MED



MED

MASCHERINE CHIRURGICHE BAMBINO TIPO IIR



Mascherina chirurgica pediatrica 3 strati
monouso / non-sterile - colore azzurro

Produttore:

Xiamen Probtain Nonwoven Inc.
No. 6, Ji an Road, Tong An District,
Xiamen, Fujian, China 361100

My Benefit®
il benessere della salute

Importatore:

My Benefit Srl

Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO
www.mybenefit.it info@mybenefit.it

My Benefit Mask



MED


MASCHERINE CHIRURGICHE BAMBINO TIPO IIR

CARATTERISTICHE

La mascherina chirurgica pediatrica tipo IIR è un dispositivo medico dal design comodo. Dotata di laccetti auricolari alle estremità, consente di indossare e rimuovere il dispositivo medico in modo semplice e veloce. La mascherina pediatrica è morbida e leggera per un uso confortevole. Le elevate prestazioni del filtro e la bassa resistenza alla respirazione garantiscono sicurezza e comfort di utilizzo. Le maschere di questa serie soddisfano elevati requisiti di prestazione ed efficienza di filtrazione dei batteri (BFE): $\geq 98\%$ secondo la classificazione EN14683:2019+AC 2019 Tipo IIR.

Le mascherine sono progettate per essere adattabili sul viso del bambino, grazie anche alle tre pieghe del tessuto che possono essere estese per aumentare la superficie coprente e alla barretta stringi-naso.

DETTAGLI TECNICI

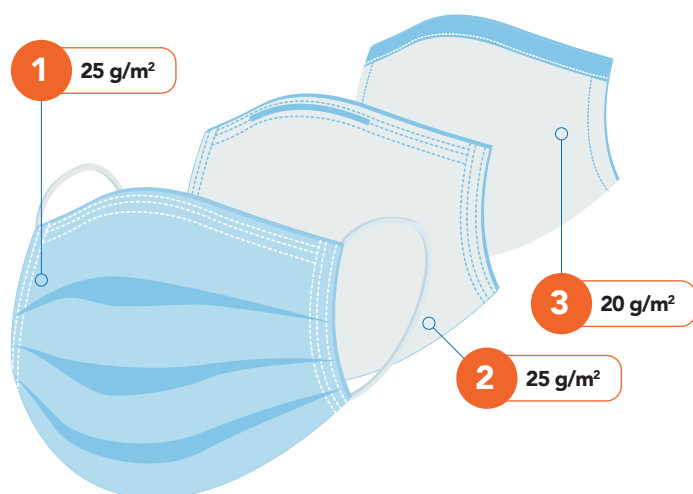

Materiale (3 strati):

- 1. Superficie esterna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto
- 2. Filtro:** Polipropilene melt-blown
- 3. Superficie interna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto

Modello: Chirurgiche pediatriche Tipo II

Dimensioni: 14.5 * 9.5 cm

Tipo: Tipo II - monouso / non sterile

Standard Filtrazione: EN 14683: 2019+AC2019 Tipo II

Progressivo di reg. di dispositivo medico: 2140999

Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Shelf life: 3 anni dalla data di produzione

FUNZIONI

Il loro uso è consigliato come misura precauzionale e laddove non sia possibile mantenere la distanza minima anti-contagio:

- A scuola;
- In ambienti affollati o ad uso pubblico;
- In ambiti sanitari ed ospedalieri;
- In presenza di persone vulnerabili;

My Benefit Mask**MED****MASCHERINE CHIRURGICHE BAMBINO
TIPO IIR****ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Aprire la confezione ed estrarre la mascherina, posizionando il clip nasale verso l'alto
2. Appoggiare la mascherina sul volto, coprendo naso, bocca e mento, e tirare l'elastico alle orecchie
3. Aggiustare il clip nasale alla forma del naso
4. Aggiustare la posizione della mascherina per un'indossatura confortevole
5. Assicursi di Indossare la mascherina correttamente. Non toccare la superficie interna della mascherina con le mani.

INDICAZIONI

Prima di utilizzare la mascherina, lavare le mani con disinfettante, alcool o sapone.

Se, durante l'uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la mascherina, evitare contatto con mani / naso / bocca e la superficie esterna della mascherina, per evitare possibili contagi. Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro e disporne nei rifiuti indifferenziati richiudendola dentro un sacchetto di plastica.

La mascherina è monouso, non riutilizzabile o riciclabile. Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

IMPORTANTE

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.

Barcode Conf. 50 pz.



8 055519 881901

Barcode Conf. 10 pz.



8 055519 881918