



Dispositivi di protezione
individuale

Mascherina FFP2

MODELLO YY0525



Mascherina filtrante 5 strati

con gancio di estensione incluso

(confezione da 25 pezzi, ciascun pezzo con proprio involucro)

 **My Benefit**[®]
il benessere della salute

Distributore:
My Benefit Srl
Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO
www.mybenefit.it info@mybenefit.it

Mascherina FFP2

MODELLO YY0525

CARATTERISTICHE

La mascherina protettiva FFP2 modello CRDLIGHT YY0525 è un dispositivo di protezione individuale (DPI) marchiata CE e certificata secondo gli standard UNI EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR nel rispetto del Regolamento UE 2016/425.


Plasmabile, assicura un ottimo livello di aderenza ed eccellente comfort, grazie anche al gancio di estensione incluso con ogni mascherina, che permette di regolare l'indossatura e allevia il fastidio dato da un uso prolungato.

Forma: le mascherine FFP2 sono realizzate con materiali anallergici, e sono sagomate per rispettare l'ergonomia e la perfetta adesione al volto.

Certificazione: le mascherine sono dotate di attestato di certificazione CE e rispettano i requisiti delle norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009.

Confezionamento: Box in cartone da 25 mascherine; ogni mascherina ha il proprio involucro.

DETTAGLI TECNICI

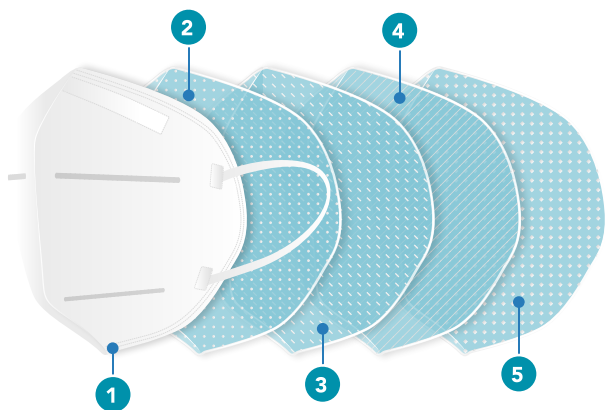

Modello: CRDLIGHT YY0525

Composizione: 5 strati (tessuto-non-tessuto)

Dimensioni: Pieghevole 15.5 x 10.5 (± 0.5 cm)

Standard Filtrazione: FFP2 – EN149:2001+A1:2009

Tempo massimo di utilizzo: 8 ore

Condizioni di conservazione: Il prodotto va conservato in ambiente con umidità relativa massima dell'80% e a temperature comprese fra -25°C e +25°C. lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Shelf life: 3 anni dalla data di produzione


FUNZIONI

La mascherina FFP2 può essere utilizzata in tutti quegli ambienti ad alto rischio infezioni o con forte esposizione a polveri e umidità quali ospedali, industrie farmaceutiche, laboratori di microbiologia, industrie manifatturiere e imprese di costruzioni.

Mascherina FFP2

MODELLO YY0525

ISTRUZIONI PER L'USO

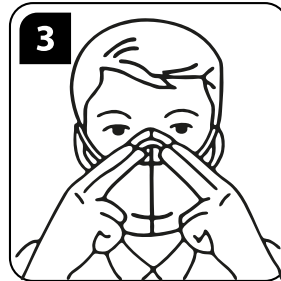

Controllare l'integrità dell'involucro in plastica prima dell'uso. Se la confezione è rotta, non utilizzare.

1. Premere la maschera contro la faccia con la striscia metallica in corrispondenza del naso.
2. Infilare entrambi gli elastici auricolari dietro le orecchie.
3. Modellare la striscia metallica fino ad un'indossatura confortevole.
4. Soffiare premendo entrambe le mani sulla maschera per controllare eventuali fuoriuscite d'aria. Se necessario, rimodellare e riposizionare fino a un livello di aderenza ottimale.

INDICAZIONI

- Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l'uso per il corretto utilizzo della maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
- La maschera non è efficace per prevenire l'inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se indossata in un'area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
- Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
- Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di agenti tossici o contaminanti.
- Abbandonare immediatamente l'attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 - Si incontrano difficoltà respiratorie;
 - Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
- Maschera monouso, non riutilizzare.
- Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l'azione filtrante.
- Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro.

IMPORTANTE

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.