

Coronavirus (2019-nCoV)- Test antigenico rapido-

Istruzioni per l'uso

REF
HGCG134S0101 (1T/Kit)
HGCG134S0105 (5T/Kit)
HGCG134S0120 (20T/Kit)
HGCG134S0140 (40T/Kit)




SPECIMEN COLLECTION



COMPONENTS



Istruzioni per l'uso

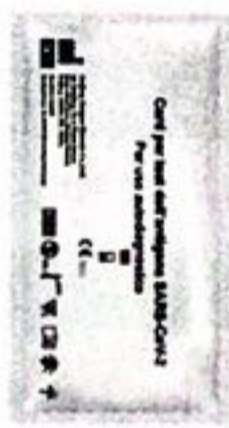

Casrd per test dell'antigene SARS-CoV-2



Provetta di estrazione del campione con soluzione buffer



Sacchetto per rifiuti a rischio biologico



Tampone sterile monouso

PROCEDIMENTO

1

Lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani prima di eseguire il test.



2

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di eseguire il test.

3



Scansionare il QR code per visionare il video tutorial con la procedura del test.




4



Estrarre il tampone dalla confezione cercando di non toccare con le mani la punta ovattata.

5

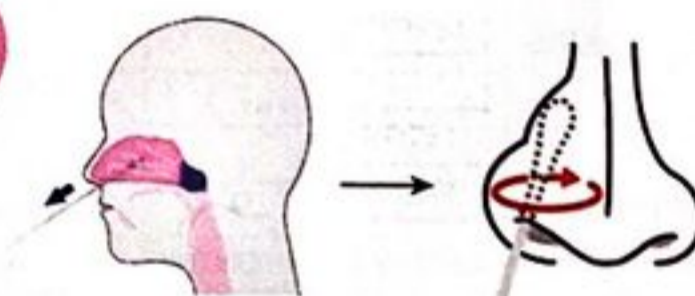

Inserire delicatamente il tampone per 1.5 cm nella narice finché non si avverte una resistenza. Con una moderata pressione, ruotare il tampone 4-6 volte nella narice per almeno 15 secondi.

6

Ripetere la procedura con lo stesso tampone anche nell'altra narice.




7



Dopo il campionamento, rimuovere il tappo viola della provetta ed immergervi il tampone.

8

Tenere il tampone immerso nella soluzione buffer per almeno 15 secondi, rotolandolo diverse volte e premendo la punta ovattata verso il fondo della provetta per almeno 3 volte.

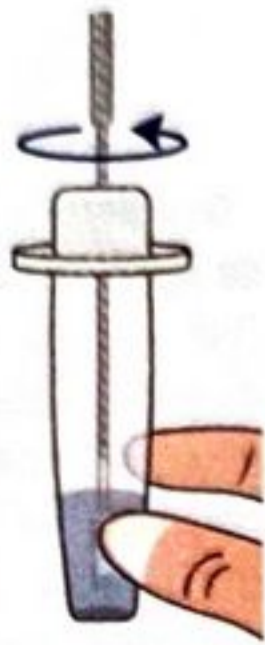

14

Dopo aver eseguito il test, sigillare tutte le componenti utilizzate nell'apposito sacchetto per i rifiuti biologici. Non riutilizzare.



9

Prima di estrarre il tampone dalla provetta, strizzarne la punta, schiacciando più volte la provetta flessibile dall'esterno con le dita.




15

Lavare o disinfettare nuovamente le mani.




10

Chiudere la provetta con l'apposito tappo viola.

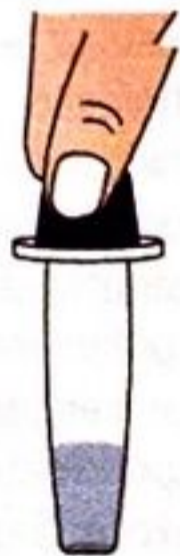

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Fig. 1

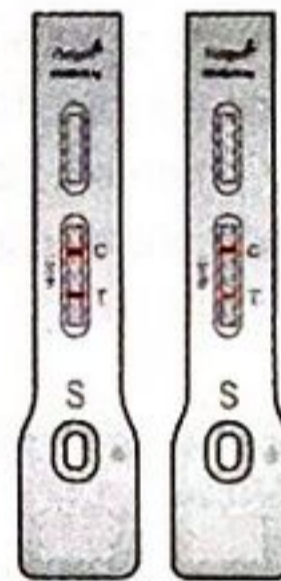

Positivo

Positivo: Appaiono due bande rosse nella finestra di lettura, come mostrato nella Fig. 1. Una banda rossa o viola appare nella zona di controllo (C) e l'altra in prossimità della zona test (T), indicando così la positività del test e una sospetta infezione da COVID-19.


Fig. 2



Negativo

Negativo: nella finestra di lettura è visibile una sola bandarossa-viola nella zona di controllo (C), indicando così l'assenza del virus SARS-CoV-2 nel campione analizzato o che la concentrazione del virus è inferiore al limite di rilevamento del kit. (Figura 2).

Fig. 3

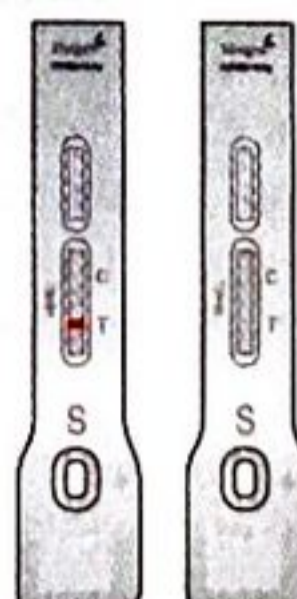

Non valido

Non valido: come mostrato in Fig. 3 nessuna linea rosso-viola appare nella finestra di lettura. Il test risulta quindi non valido. Si consiglia di rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo kit.


11

Aprire la confezione e posizionare la card reattiva su una superficie piana.



12

Togliere il tappo trasparente e aggiungere 4 gocce del composto nel pozzetto (S) della card reattiva.

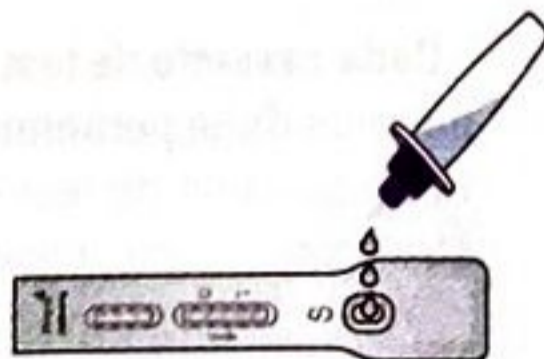

13

Leggere i risultati dopo 15 minuti. I risultati letti dopo 30 minuti non sono più validi.

