



Dispositivi medici  
e sanitari

# Irrigatore nasale per infanti

Formato 10 ml



Conf. 2 pezzi

**Dispositivo per la pulizia delle cavità nasali di bambini e neonati**

# Irrigatore nasale per infanti

## Formato 10 ml

### CARATTERISTICHE

Irrigatore nasale con punta in morbido silicone, con capacità di aspirazione di 10 ml. Favorisce l'igiene delle cavità nasali e contrasta l'insorgere di infezioni favorite dal ristagno del muco nel naso di bambini e neonati.

**Confezionamento:** Confezione 2 pz. / Imballo 360 conf. 2 pz.

### DETTAGLI TECNICI

**Materiale:** silicone, plastica

**Formato:** 10 ml

**Condizioni di conservazione:** Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta ed a fonti di calore superiori a 37° C.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- 1. Riempire la siringa con soluzione fisiologica.
- 2. Inserire la punta in silicone nella narice del bambino, che dovrebbe essere leggermente inclinata in avanti.
- 3. Svuotare il contenuto della siringa, assicurandosi che la bocca del bambino sia aperta.
- 4. Lasciare che le secrezioni fuoriescano da una o entrambe le narici, o anche dalla bocca
- 5. Utilizzare esattamente la stessa procedura per l'altra narice.

### MANUTENZIONE

Lavare e disinfettare i componenti dell'irrigatore in acqua bollente per 3 minuti. Ispezionare regolarmente il puntale in silicone; se il puntale mostra segni di deformazione o usura, procedere alla sostituzione.

